

E-테라피, 온열, 석션, 생체에너지
바이오에너지 미용전문기기

셀비타

E-매뉴얼

옆으로 넘기기 >



셀비타

사용설명서

- 안전을 위한 주의사항
- 제품 구성품
- 연결단자 설명
- 온열+석션+E-테라피 연결 단자 설명
- 화면안내 및 사용설명
- 에너지모드, 석션모드 설명
- 효과적인 관리를 위한 사용 TIP
- 소비자 보호 규정
- 이상 증상 시 주의사항
- 제품 보증서



안전을 위한 주의사항



안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

※ 이 설명서의 저작권은 셀비타에 있습니다.

※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있습니다.

- 셀비타의 사전 서면 동의 없이 이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하거나 정보 검색 시스템에 저장하거나 기계, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 등 어떠한 형태나 수단으로도 전송하는 것을 금합니다.
- 셀비타는 이 설명서에 포함된 정보의 사용과 관련된 특허 문제에 대해 책임지지 않습니다.
- 또한 이 설명서에 포함된 정보를 사용함으로써 발생한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.
- 셀비타는 이 제품 구입자 또는 제 3자가 이 제품의 사고, 오용, 남용 또는 이 제품의 무단 변형, 수리, 개조 또는 셀비타의 운영 관리 지침에 대한 미준수로 입은 손해 및 손실, 비용 또는 지출에 대해 책임지지 않습니다.
- 셀비타는 당사 정품 또는 공인 제품으로 지정한 제품 이외의 옵션이나 소모품을 사용하여 발생한 손해나 문제에 책임지지 않습니다.
- 이 사용설명서의 그림과 실제 제품의 모습은 다를 수 있습니다.
- 이 설명서에 사용된 타사 제품 이름은 단지 확인용이며 각 소유 회사의 상표일 수 있습니다.
- 셀비타는 이들 상표에 대한 어떠한 권리도 없습니다.



※ 제품의 사용전 설명서와 사용법을 숙지후 사용하시기 바랍니다.

- 제품을 직사광선이 노출된 곳, 화기 및 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.
- 설치된 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하세요.
- 장시간 사용시 팁의 온도가 올라가 뜨거워질 수 있으니 주의하세요.
- 장시간 미 사용시 전원을 끄고 전원플러그를 뺀 후 보관하여 주세요.
- 제품이 넘어지거나 제품에 다른 물건이 떨어지지 않도록 주의하세요.
- 목욕탕이나 습기에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치 사용을 금합니다
- 제품 상단에 컵, 화장품 등의 액체용기를 올려 놓지 마세요.
- 제품 내부에 물, 동전 등 이물질이 들어 가지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 제품 내부에 이물질이 들어간 경우 즉시 전원을 끄고 전원플러그를 뺀 후 A/S센터에 연락 바랍니다.
- 사용중 제품에서 이상한 연기가 나거나 냄새가 날 때 즉시 사용을 중단하고 전원플러그를 뺀 후 A/S 센터에 연락 바랍니다.
- 제품을 임의로 분해 또는 개조하지 마시고 고장시 본사 또는 본사가 지정한 A/S 센터에 연락 바랍니다.
- 무상 보증기간이라도 제품을 임의로 분해한 경우 보증에서 제외됨을 알려 드립니다.

Cellvita

제품구성품

셀비타 구성품

※ 다음 목록을 확인하여 기본 제공된 항목을 확인하십시오. 누락되거나 손상된 경우 제품 구입처에 문의하십시오.

01 기기 본체



03 멀티 핸드피스(경혈도자·빔광사)



04 핸드피스(대·중·소)



02 거치대

Cellvita

제품구성품

셀비타 구성품

05 필터지



06 접지플레이트



07 온열+석션+E-테라피 연결선



08 파워 전원선



Cellvita

연결단자 설명

핸드피스와 연결단자



기계본체 뒷면



Cellvita

연결단자 설명

핸드피스와 연결단자

※ 핸드피스와 연결단자를 확인한 후 알맞게 연결하여 주십시오.



01

파워 전원선



02

E-THERAPY 멀티 핸드피스 (경혈도자·빗갈사)



03

HEAT+SUCTION+E-THERAPY 핸드피스(대·중·소)



04

접지플레이트

Cellvita

온열+석션+E-테라피 연결 단자 설명

연결 및 탈거 설명

※ 핸드피스와 연결단자를 확인한 후 알맞게 연결하여 주십시오.

온열+석션+E-테라피 연결 방법

온열+석션+E-테라피 연결줄과 본체 연결시 검은표시를 맞춰 연결하여 주십시오.



Cellvita

온열+석션+E-테라피 연결 단자 설명

연결 및 탈거 설명

온열+석션+E-테라피 탈거 방법

온열+석션+E-테라피 연결줄과 본체 탈거시 연결단자를 아래로 당긴 후 탈거하여 주십시오.



Cellvita

화면안내 및 사용설명

1. 온열+석션+E-테라피 케어시스템

※ 셀비타는 온열+석션+E-테라피와 E-테라피 두가지 케어시스템으로 구성되어 있습니다.



초기화면(홈 모드 화면)



HEAT+SUCTION+E-THERAPY 화면

Cellvita

화면안내 및 사용설명

1. 온열+석션+E-테라피 케어시스템

초기화면(홈 모드 화면)



01

도자 선택

사용하고자 하는 기능 HEAT+SUCTION+E-THERAPY 또는 E-THERAPY 중하나를 선택합니다.

화면 1

HEAT+SUCTION+E-THERAPY 화면



01

온도, 석션강도, 사용 시간 설정

업, 다운 버튼을 터치해서 각각 조절이 가능합니다.



업 버튼



다운 버튼

02

에너지 레벨 설정

업, 다운 버튼으로 레벨 조절이 가능합니다.



03

에너지 모드 설정

원하는 모드 선택 후 스타트가 가능합니다.



석션모드 설정

원하는 석션모드 선택 후 스타트가 가능합니다.



AUTO

화면안내 및 사용설명

2. E-테라피 케어시스템

화면 2

E-THERAPY 화면



01

온도, 사용 시간 설정

업, 다운 버튼을 터치해서 레벨조절이 가능합니다.



업 버튼




다운 버튼

02

에너지 모드 설정

원하는 모드 선택 후 스타트가 가능합니다.

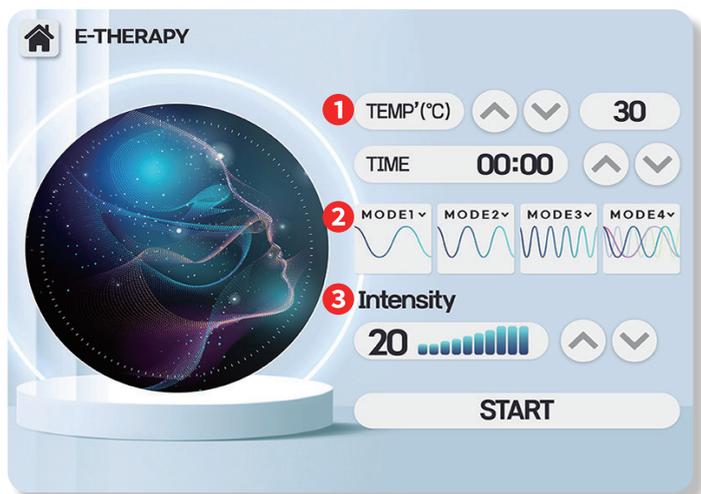


03

에너지 레벨 설정

업, 다운 버튼을 레벨 조절이 가능합니다.

에너지모드, 석션모드 설명

에너지 모드 설정

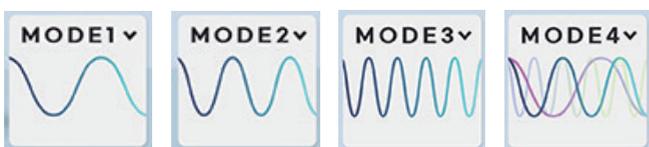

- MODE 1 : 릴렉스 (긴장완화 부드럽게 마사지)
- MODE 2 : 라이트 (가벼운 림프 순환마사지)
- MODE 3 : 사이클 (빠짐없이 디테일하게 연속)
- MODE 4 : 파워풀 (1·2·3 복합모드, 강한관리)

석션모드 설정



- ①,② 석션모드 : 림프순환 모드부드럽게 풀어주는 펄스
- ③,④,⑤ 석션모드 : 근막법모드 강하고 깊게 근막층까지 잡아주는 펄스
- ⑥ : 석션 연속모드
- ⑦ : AUTO 석션모드 : 1~6번 모드 랜덤방식



효과적인 관리를 위한 셀비타 사용 TIP

관리 전 워밍업으로 뭉친 근육이나 혈을 깊고 부드럽게 풀어주면 극대화 된 효과를 만나보실 수 있습니다.



고객에 따라 핸드피스, 모드를 적절히 조절해 주세요.



01

에너지(모드1)+온열(45~50도) 10분 ~ 15분 관리 (석션사용X)

02

에너지위주로 집중관리 시 석션모드를 사용하지 않거나 석션 저강도(1~5)

03

석션위주로 집중관리 시 에너지레벨을 저강도로 사용(1~5)

Cellvita 소비자 보호 규정

서비스에 대하여

저희 본사에서는 품목별 소비자 피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 제품의 설치는 설치전문가에게 의뢰하여 설치하시고 설치전문가가 아닌 사람이 설치하여 고장이 난 경우 A/S를 받으실 수 없습니다. 고장 발생 시 서비스센터로 연락 바랍니다.

무료 서비스 (제품 보증기간은 1년 입니다.)

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생 시	제품교환	
구입 후 14일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 중요 이상 발생 시	제품교환	

유료 서비스

1) 고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 한함)
- 제품의 고장이 아닌 설치상의 문제로 재설치 할 경우

2) 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 대리점이나 A/S 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시
- 설치 후 이동 시 떨어트림 등에 의한 고장 손상 발생 시
- 본사에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시

3) 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 충격 전압으로 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우

Cellvita 이상 증상시 주의사항



주의

아래 사항과 같이 점검을 하여도 이상할 경우에는 사고 방지를 위해 사용을 중지하고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후, 고객센터 센터로 문의해 주십시오. 개인의 수리는 위험하므로 절대로 수리하지 말아주십시오.

- 전원플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있습니까?
- 핸드피스 정확하게 장착되어 있습니까?
- 핸드피스 케이블이 본체에 잘 꽂혀 있습니까?

제품 보증서

제품명	C E L L V I T A (셀비타)
일련번호	
구입(설치)일	2 0 년 월 일
고객성명	
전화	
주소	
설치점 상호	
전화	
주소	
설치 기사명	

※ 참고 : 수리를 의뢰 할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1) 무상보증기간은 제품구입일로부터 산정됨으로 본 제품의 보증서를 작성 하시기 바랍니다.
- 2) 구입일자 확인이 안될 경우 본 제품 제조일로부터 30일이 경과한 날로부터 보증기간을 산정합니다.

이 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
사용자의 주의사항 미 숙지로 인한 사고는 책임지지 않습니다.

 **BEAUTTIUM**
BEAUTY & CARE

CE@VITA

WELLNESS

28794 충북 청주시 서원구 월평로 78 4F T. 010-5798-7586

